

PB/I-04 Instrukcja użycia nakłuwacza Safety-Lancet**Zasady postępowania:**

1. Usunąć osłonę ostrza poprzez przekręcenie jej o 360°, **nie należy aktywować przycisku przed zdjęciem osłony.**

2. Przyłożyć nakłuwacz do miejsca nakłucia, a następnie naciśnij przycisk nakłuwacza kciukiem zdecydowanym ruchem. **Aby uzyskać wymaganą ilość krwi, zastosuj przerywany nacisk na miejsce w pobliżu nakłucia.**

3. Zużyty nakłuwacz należy zutylizować.

Przydatne wskazówki:

Przed wykonaniem pobrania, pacjent powinien umyć dłonie ciepłą wodą z mydłem. Rozgrzanie dłoni poprawia krwioobieg, co przyczynia się do zwiększenia kropli krwi.